

用户手册

RP-917


EIZO 54.1 cm (21.3 英寸) 级别液晶显示器的屏幕保护膜

注意

- 屏幕保护膜的表面容易变脏(沾上灰尘或指印)。安装/拆卸屏幕保护膜时应使用随附的手套。
- 请使用随附的胶带,安装时小心不要让屏幕保护膜划伤液晶面板或外壳。此外不要经常取下屏幕保护膜,否则可能划伤或损坏液晶面板。
- 液晶显示器与选购的屏幕保护膜一起使用时,最好避免显示器面朝下。否则屏幕保护膜可能会弯曲或从显示器上脱落。
- 若在安装屏幕保护膜后使用集成式前传感器,请务必使用RadiCS/RadiCS LE执行关联。参照各自的用户手册了解详情。

安装

安装之前,擦除液晶面板上的灰尘和污垢。

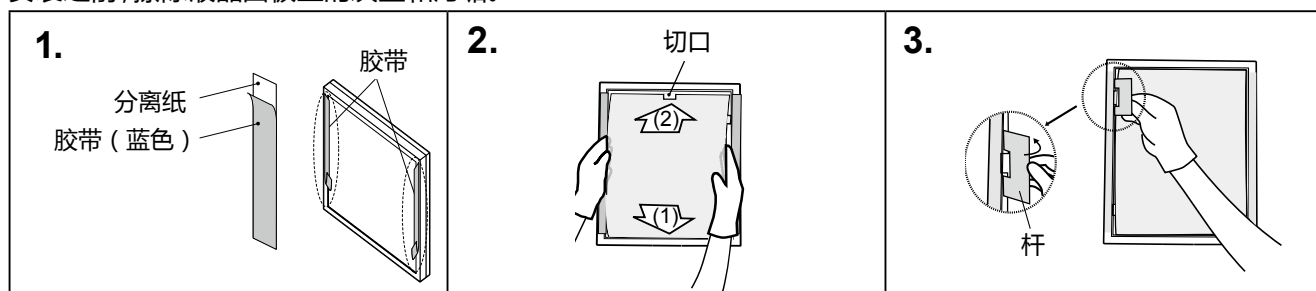

1. 从分离纸上撕下胶带,将其粘在外壳的左、右两边。

将胶带粘在外壳的长边。

2. 将屏幕保护膜卡入面板边框的槽中,先下(1)后上(2)。

屏保上有一个和传感器形状匹配的切口。安装屏幕保护膜时,将切口对准传感器位置。若方向弄错,可能会损坏传感器。

3. 用随附的工具(杆)将屏幕保护膜的(4个)凸起插入侧面凹槽。

把杆放在屏幕保护膜的凸起上,朝液晶面板移动,进行安装。将保护膜紧密地装入液晶面板,不要留下开口。

4. 从外壳上撕下胶带。

拆卸

把杆放在屏幕保护膜的凸起上,朝向外壳移动,将其取下。

清洁

本产品随附专用清洁布,用于清除保护膜上的污垢。

如有必要,请将小块布用水蘸湿,增强其清洁能力,以除去顽垢。

注意

- 本产品随附专用清洁布,用于清除保护膜上的污垢。否则可能划伤液晶面板表面。
- 酒精、消毒液等化学试剂可能导致机壳或面板光泽度变化、失去光泽、褪色及图像质量降低。
- 切勿使用任何可能会损伤机壳或面板的稀释剂、苯、蜡和研磨型清洗剂。

注

- 建议使用选购的ScreenCleaner清洁机壳和面板表面。

规格

| | | | |
|-------|---|--------|---------|
| 表面处理 | 防发射涂层(两面) | 表面硬度 | 4H |
| 反射率 | 小于1% | 可见光透过率 | 大于95.0% |
| 尺寸/净重 | 341.5mm(宽度) × 425.7mm(高度) × 1.2mm(深度) / 约210g | | |
| 配件 | 杆(屏幕保护膜用),手套,清洁布,用户手册,胶带4件(2套) | | |



EIZO Corporation

153 Shimokashiwano, Hakusan, Ishikawa 924-8566 Japan
Phone: +81 76 277 6792 Fax: +81 76 277 6793

EIZO Europe GmbH

Helmut-Grashoff-Strasse 18, 41179 Mönchengladbach, Germany
Phone: +49 2161 8210210 Fax: +49 2161 8210150

EIZO 株式会社

〒 924-8566 石川県白山市下柏野町 153 番地

<http://www.eizoglobal.com>
<http://www.eizo.co.jp>

Copyright © 2016 EIZO Corporation. All rights reserved.

1st Edition-September, 2016 Printed in Japan.

00N0L965A1
(UM-RP-917-AL)