



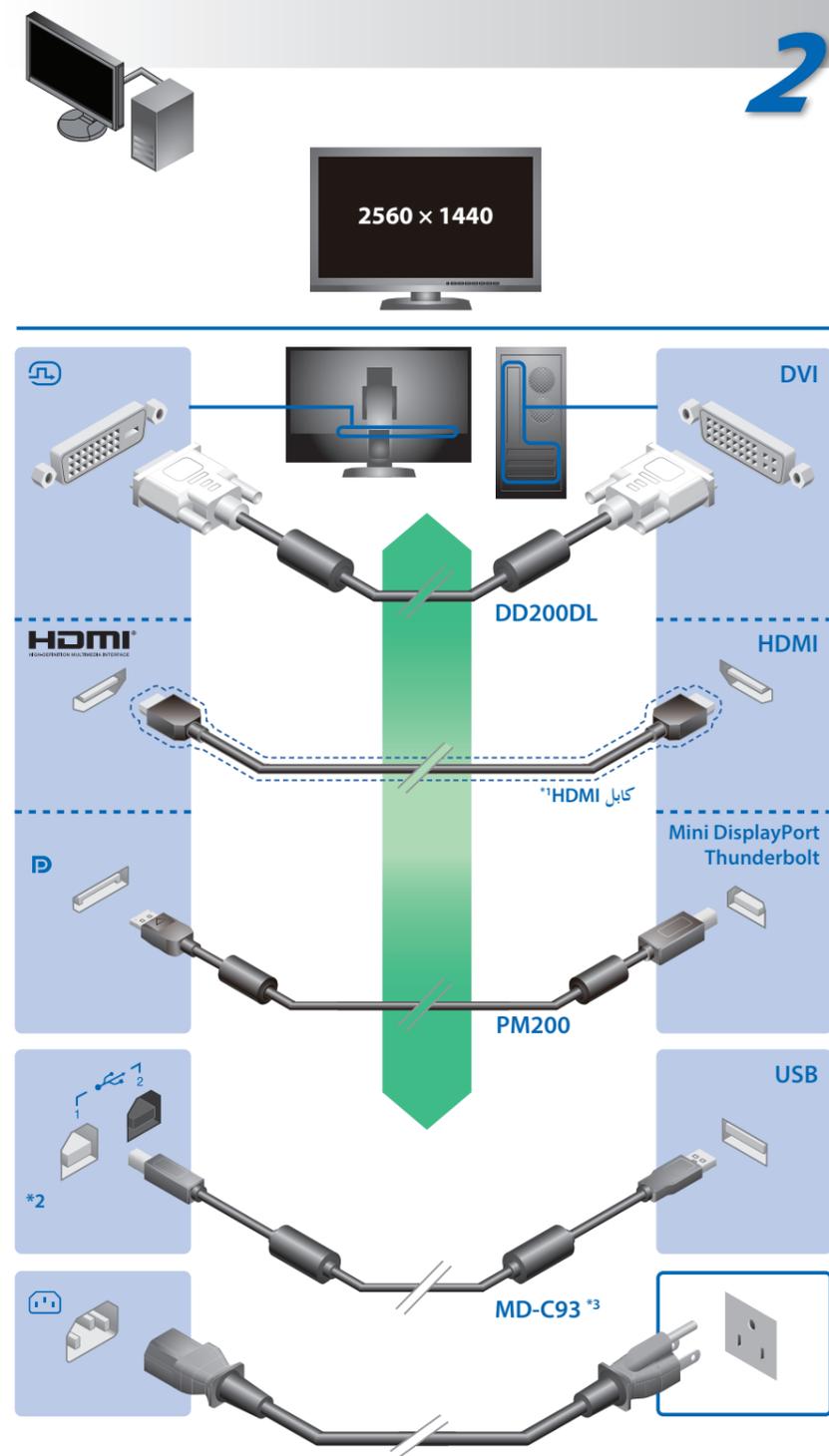


1

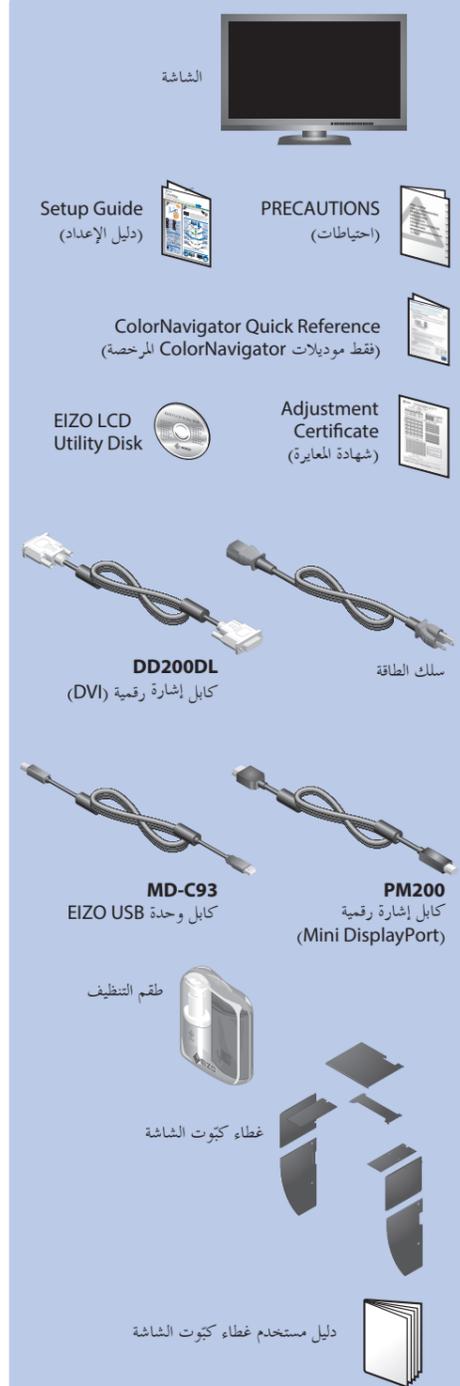

2


3 للحصول على معلومات حول كيفية تجميع غطاء الشاشة، راجع دليل المستخدم لغطاء الشاشة (في علبة تعبئة غطاء الشاشة).

3

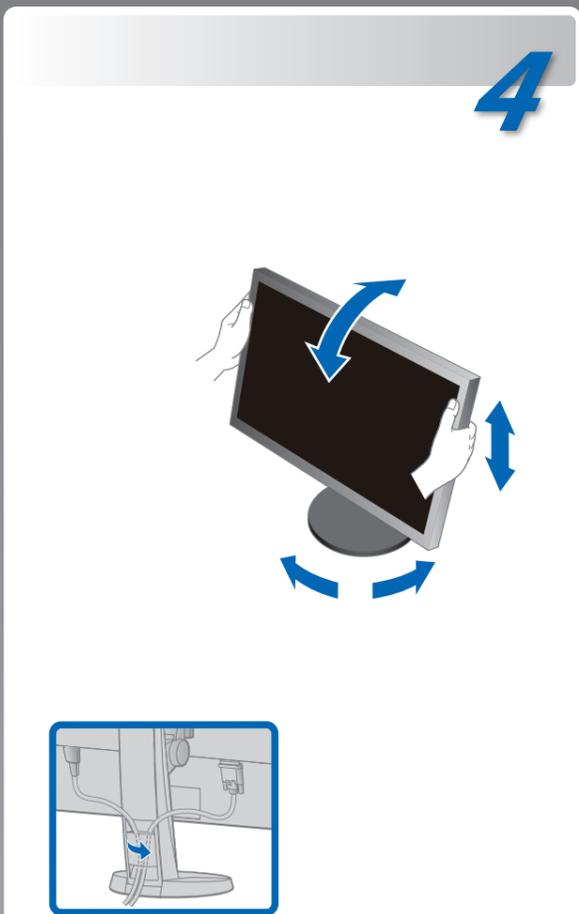

4

5

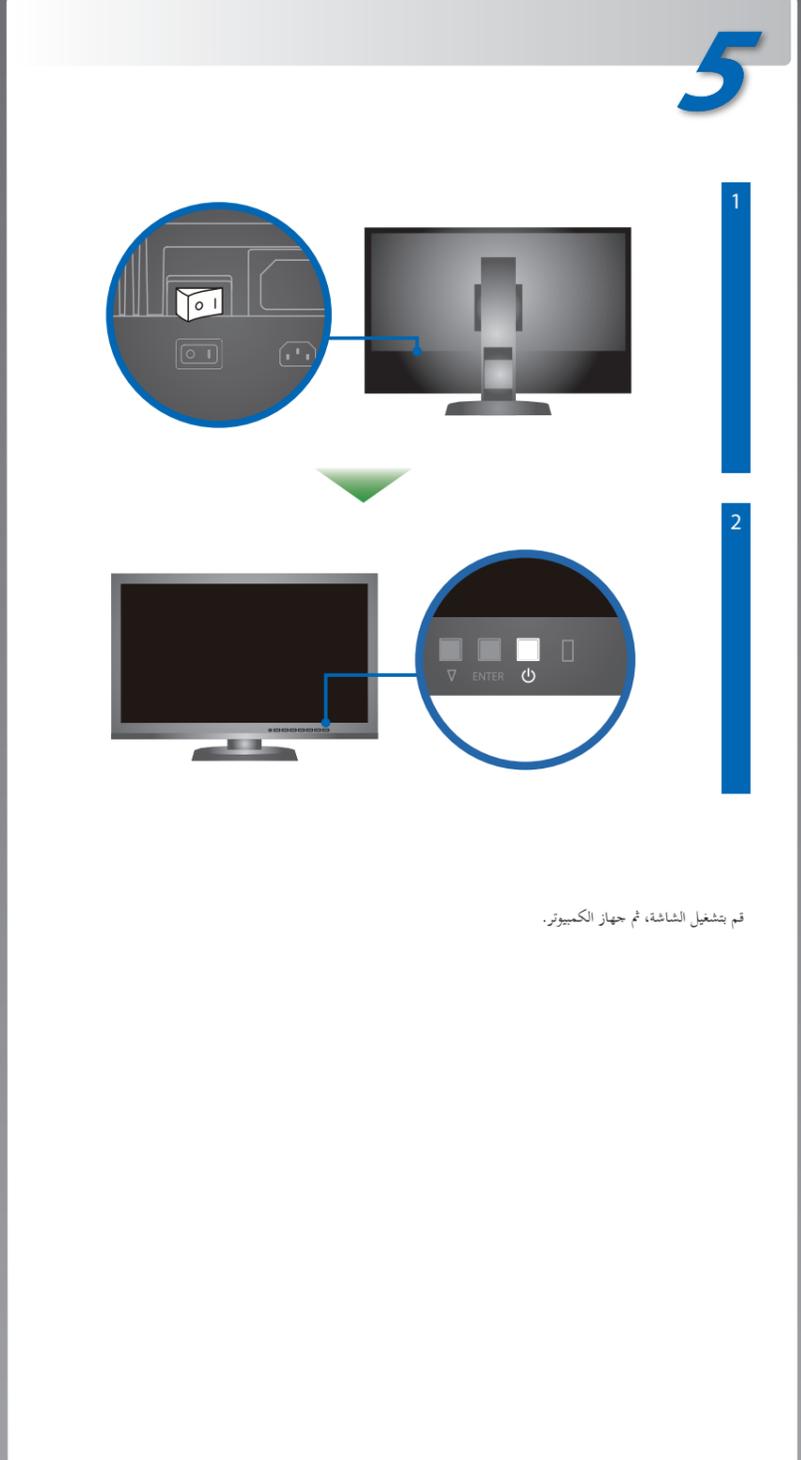


قم بتشغيل الشاشة، ثم جهاز الكمبيوتر.


\*1 منتج متوفر تجاريًا. استخدم منتج يمكنه تحمل السرعات العالية.  
\*2 يتم تعطيل منفذ USB صاعد رقم 2 افتراضيًا. استخدم المنفذ 1 لتغيير الإعدادات. راجع دليل المستخدم الخاص بالشاشة. كابل وحدة ال USB مطلوب لتحديد القياس. تأكد من وصل الشاشة و الكمبيوتر بكابل وحدة ال USB.  
\*3




مشكلة عدم وجود صورة

في حالة عدم عرض أي صورة على الشاشة حتى بعد تنفيذ إجراء الإصلاح التالي، اتصل بوكيل EIZO المحلي.

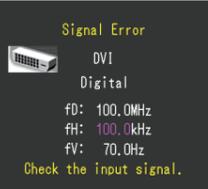
مشاكل	السبب المحتمل والعلاج
مؤشر التشغيل لا يضيء.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق مما إذا كان سلك الطاقة متصلاً بشكل صحيح.</li> <li>قم بتشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي.</li> <li>اضغط على الزر .</li> <li>أوقف تشغيل مصدر الطاقة الرئيسي، ثم أعد تشغيله مرة أخرى بعد مرور بضع دقائق.</li> </ul>
لا توجد صورة	<ul style="list-style-type: none"> <li>قم بزيادة "Brightness" (السطوع) و/أو "Gain" (الكتساب) في قائمة الضبط.</li> <li>قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL.</li> <li>شغل الماوس أو لوحة المفاتيح.</li> <li>افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.</li> </ul>
مؤشر التشغيل يومض باللون البرتقالي والأزرق.	<ul style="list-style-type: none"> <li>تم توصيل الجهاز باستخدام منفذ DisplayPort/HDMI فهل يوجد به مشكلة. قم بحل المشكلة، وأوقف تشغيل الشاشة، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى. راجع دليل المستخدم لجهاز الحرج الذي يستخدمه للتعرف على التفاصيل.</li> </ul>
تظهر هذه الرسالة في حالة عدم وجود إشارة دخل. مثال: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>قد تظهر الرسالة المعروضة على اليسار، وذلك لأن بعض أجهزة الكمبيوتر لا تُخرج الإشارة مباشرة بعد تشغيل الطاقة.</li> <li>افحص للتحقق من أن جهاز الكمبيوتر قيد التشغيل.</li> <li>تحقق مما إذا كان كابل الإشارة متصلاً بشكل صحيح.</li> <li>قم بتحويل إشارة الدخل باستخدام SIGNAL.</li> </ul>
تظهر الرسالة أن إشارة الدخل خارج نطاق التردد المحدد. (يتم عرض تردد الإشارة هذا باللون الأرجواني). مثال: 	<ul style="list-style-type: none"> <li>تحقق ما إذا تمت تهيئة جهاز الكمبيوتر لموافقة متطلبات الدقة وتردد المسح العمودي الخاص بالشاشة.</li> <li>أعد تشغيل الكمبيوتر.</li> <li>قم بتغيير الوضع إلى الوضع المناسب باستخدام برامج الأدوات المساعدة الخاصة بلوحة الرسومات. راجع دليل لوحة الرسومات للحصول على التفاصيل.</li> <li>تردد الصورة النقطي fD:</li> <li>تردد المسح الأفقي fH:</li> <li>تردد المسح العمودي fV:</li> </ul>

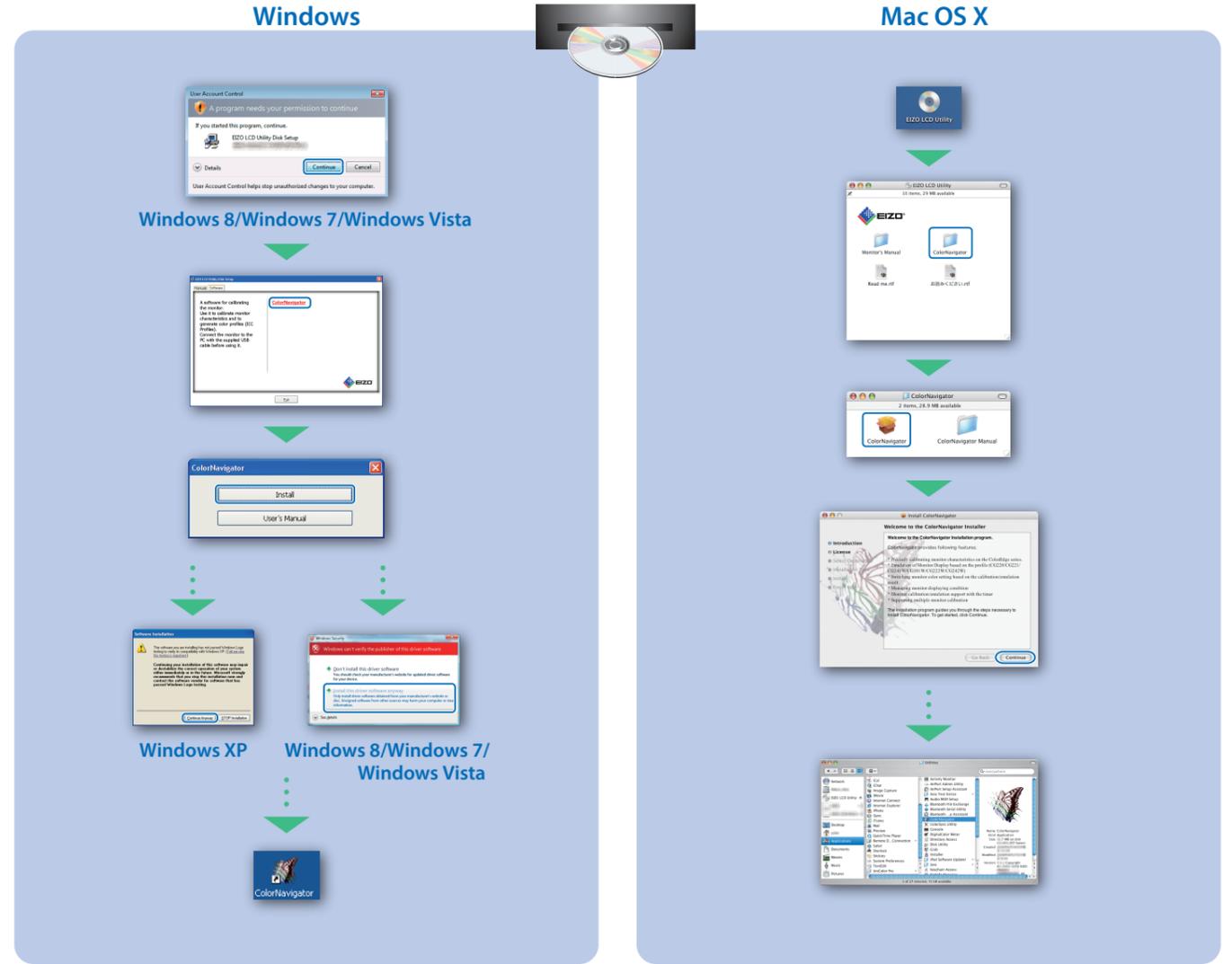

تدوير الشاشة

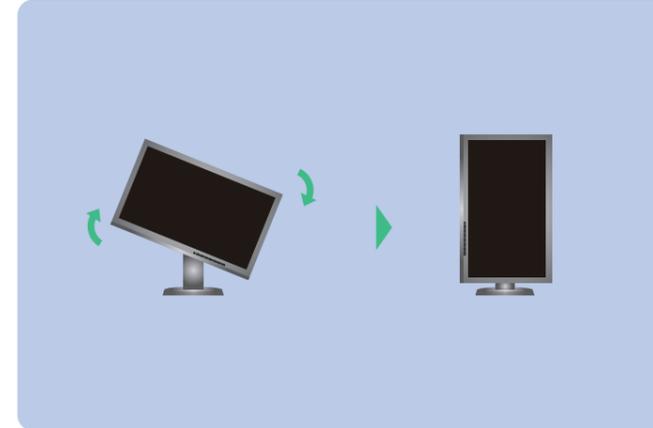

SelfCalibration

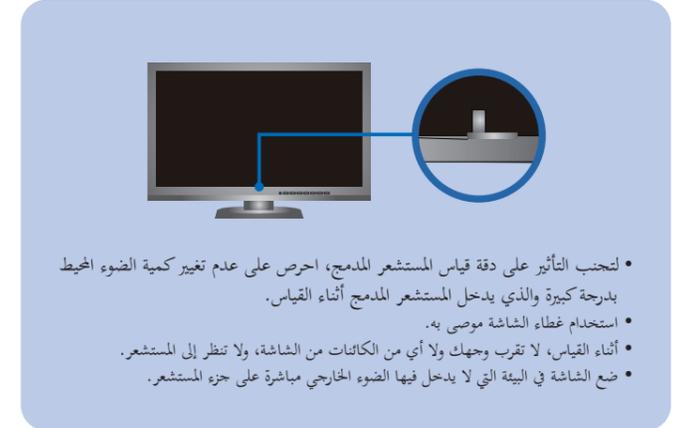

لتعليمات التشغيل، عليك بالرجوع إلى "المرجع السريع" ودليل المستخدم ColorNavigator (مخزن في القرص المضغوط).  
للتفاصيل حول SelfCalibration، راجع دليل مستخدم الشاشة الموجود في القرص المضغوط.

